

POCT INR-2, 2019

Vítejte v kontrolním cyklu EHK POCT-INR, který je určen pro přístroje **Roche CoaguChek**, **Siemens Xprecia Stride** a **Abbott i-Stat**.

Kontrolní vzorek

Kontrolní vzorek **Sample 1** (S001: LQ708319021) obsahuje **plazmu v kapalné formě** o objemu 0,3 ml.

Postup zacházení se vzorkem pro přístroje CoaguChek a Xprecia Stride je přiložen (obrázky).

Vzorek je připraven k přímému použití. Kontrolní plazmu **analyzujte okamžitě** po její doručení. Pokud to není možné, uskladněte kontrolní plazmu v lednici při teplotách +2 až +8 °C a **analyzujte ji co nejdříve**. Před analýzou vyjměte kontrolní vzorek z lednice a nechte ho vytemperovat na stole na pokojovou teplotu a pak analyzujte. Z bezpečnostních důvodů zacházejte s kontrolním vzorkem tak, jako s patientským vzorkem, který je potenciálním přenašečem sérologických onemocnění.

V kontrolních materiálech bylo licenčními činidly prokázáno, že neobsahují protilátky proti HIV ani HbsAg. Žádná známá testovací metoda nemůže poskytnout úplnou jistotu, že vzorky nemohou přenášet tyto nebo jiné infekční onemocnění. S materiály pro kontrolu kvality, které pocházejí z lidské krve, se musí zacházet stejně opatrně jako se vzorky pacientů, tj. jako s potenciálními přenašeči závažných onemocnění.

Návod k použití

Roche CoaguChek

Na přístroji **CoaguChek měřte kontrolní vzorek stejným způsobem, jako patientský vzorek** (tj. v režimu pro pacienty).

Siemens Xprecia Stride

Na přístroji **Xprecia Stride měřte kontrolní vzorek v režimu pro kontroly** (ne jako patientský vzorek). Když přístroj vyzve k zadání kódu prosím naskenovat čárový kód níže.



Výsledky

Výsledkový protokol můžete zaslat **on-line** anebo **e-mailem** nejpozději do **18. 11. 2019**. Odkazy (linky) naleznete na výsledkových protokolech.

Produkt č. 4335
LQ708319021/SE



LQ708319021

Souprava obsahuje jeden vzorek kontrolní plazmy S001 a výsledkový formulář.

Zkontrolujte zásilku, a pokud je neúplná, okamžitě **informujte** Labquality nebo vašeho distributora.

Dotazy

Labquality koordinátor
Anja Pakkanen
anja.pakkanen@labquality.fi

Konzultant pro ČR

Jan Balla
jan.balla@manacon.sk

VÝSLEDKY

Vyplňte výsledkový protokol a pošlete ho na adresu
jan.balla@manacon.sk

nejpozději do 18. 11. 2019

Labquality

Kumpulantie 15
FI-00520 HELSINKI
info@labquality.fi
www.labquality.fi

Telefon: +358 9 8566 8200

Fax: +358 9 8566 8280

+358 9 8566 8281

© Labquality

