

POCT INR-2, 2019

Vítejte v kontrolním cyklu EHK POCT-INR, který je určen pro přístroje **EuroLyser Smart 700/340** a **EuroLyser Cube**.

Kontrolní vzorek

Kontrolní vzorek **Sample 3** (S003: LQ708319023) obsahuje **lyofilizovanou plazmu**.

Kontrolní plazmu **analyzujte okamžitě** po její doručení. Pokud to není možné, uchovávejte neotevřenou lahvičku v chladničce při teplotách +2° až +8° C a **analyzujte ji co nejdříve**.

Příprava vzorku

Před analýzou vyjměte vzorek z chladničky a nechte ho dosáhnout pokojové teploty. Otevřete lahvičku opatrně, abyste zabránili úniku vysušeného materiálu a **přidejte do ní 1,0 ml destilované vody**. **Je důležité přenést veškerý objem destilované vody** z přiložené lahvičky! Lahvičku okamžitě uzavřete a nechte ji, chráněnou před světlem, stát asi půl hodiny při pokojové teplotě, dokud je celý materiál zcela rozpuštěn. Lahvičku několikrát zamíchejte, abyste rozpustili jakýkoli materiál, který přilne k zátce. **NETŘEPAT!** Plazma po rozpuštění může být skladována 4 hodiny při pokojové teplotě.

Dále postupujte podle pracovního postupu výrobce vašeho přístroje. **POZOR!** **Pro měření kontrolního vzorku nezapomeňte nastavit přístroj na režim "Ctrl. Plasma"**. INR v kontrolním vzorku změřte dvakrát a oba výsledky zapište do výsledkového protokolu.

Upozornění

Z bezpečnostních důvodů zacházejte s kontrolním vzorkem tak, jako s patientským vzorkem, který může být potenciálním přenašečem sérologických onemocnění. V kontrolních materiálech bylo licenčními činidly prokázáno, že neobsahují protilátky proti HIV ani HbsAg. Žádná známá testovací metoda nemůže poskytnout úplnou jistotu, že vzorky nemohou přenášet tyto nebo jiné infekční onemocnění. S materiály pro kontrolu kvality, které pocházejí z lidské krve, se musí zacházet stejně opatrně jako se vzorky pacientů, tj. jako s potenciálními přenašeči závažných onemocnění.

Výsledky

Výsledkový protokol zašlete **e-mailem** nejpozději do **18. 11. 2019**. Odkazy (linky) naleznete na výsledkových protokolech.

2019-11-04

POKYNY

Produkt č. 4337
LQ708319023/AT



Souprava obsahuje:

- 1 lahvičku kontrolní plazmy
- 1 lahvičku destilované vody
- 1 kapilární pipetku

Zkontrolujte zásilku, a pokud je neúplná, okamžitě informujte Labquality nebo vašeho distributora.

Dotazy

Labquality koordinátor
Anja Pakkanen
anja.pakkanen@labquality.fi

Konzultant pro ČR

Jan Balla
jan.balla@manacon.sk

VÝSLEDKY

Vyplňte výsledkový protokol a pošlete ho na adresu
jan.balla@manacon.sk

nejpozději do 18. 11. 2019

Labquality

Kumpulantie 15
FI-00520 HELSINKI
info@labquality.fi
www.labquality.fi

Telefon: +358 9 8566 8200

Fax: +358 9 8566 8280

+358 9 8566 8281

© Labquality

